

Dycem[®] non-slip

GRIPS • HOLDS • OPENS



삶을 보다 편하게





Dycem 미끄럼방지의 세계에 오신 것을 환영합니다 .

Dycem의 첫 인상은 참으로 단순한 제품으로 보이지만, 이 제품을 가지고 할 수 있는 것들의 목록을 작성하다 보면 본 제품이 얼마나

요긴한 도구인지 깨닫게 됩니다. 가정에서 뿐 아니라, 직장에서, 또한 여가 시간에도 긍정적인 영향을 줍니다. 이와 같은 환경에서 통증완화를 위해, 관절을 보호하고자, 물건의 자리를 잡는 데에, 또는 독립성을 키우는 등 개인의 필요에 따라 다르게 사용될 것입니다.

Dycem 제품의 다재다능함은 남녀노소를 막론한 필수 '도구'임을 반증해줍니다. 한 제품이 가진 용도가 수도 없이 많다는 것입니다.

이 안내책자에는 그동안 우리가 제시해온 몇몇 사용법들이 포함되어있는데, 과연 Dycem이 어떻게 당신의 삶을 보다 편하게 해 줄 수 있을까요?

Jen

젠 케이브-에일랜드 (Jen Cave-Ayland),
작업 치료사

Dycem 미끄럼방지 제품은 들러붙지 않으면서 양면이 움직이지 않도록 움켜줍니다. 일상 활동과 운동 중에 움켜쥐는 능력 향상 및 버팀, 안정감, 시각적 역할과 자신감을 제공합니다.

Dycem 미끄럼방지:

- ✓ 다목적- 잡아주고, 버텨주고 & 열어줌
- ✓ 지속성- 용이한 청소
- ✓ 비독성, 라텍스를 쓰지 않음
- ✓ 은 항균제 내장
- ✓ 전문가들이 정선한 제품
- ✓ 수상 경력
- ✓ 사용이 용이함

Dycem 미끄럼방지는: Help for Heroes & Arthritis care 를 지원하고 있음을 자랑스럽게 생각합니다.





Dycem 스토리

이 모든 일의 발단은 1960년도 브리스톨 주재 혁신적인 컨설턴트 엔지니어인 데이비드 세실 밀즈(David Cecil Mills)가 사물을 강력하게 붙잡는 성질을 가진 특별한 고분자를 발견한 데서 시작됩니다.

오리지널 제품으로는 미끄럼방지 쟁반과 옷걸이로, 각종 틈새 소매점에서 판매되었습니다.

회사의 오리지널 미끄럼방지 제품 라인은 곧 더 넓은 방면에서 안정성과 붙잡는 데에 있어서의 문제를 다루는 다양한 제품들로 성장했습니다.

Dycem 이 탄생한 것입니다...

Dycem은 현재 오랜 전통을 가진 영국 제조회사로서 품질과 신뢰성에 있어 확고한 명성을 가지고 있습니다.

Dycem은 ISO 9001:2008 기준 하에 국제적 인정을 받고 있으며 또한 ISO 14001:2004 환경 관리 기준을 달성함에 자부심을 가집니다.


지난 수년간 Dycem은 치료 전문가들로부터 미끄럼방지 해결책으로 채택되어 왔습니다.



기울임 각도 58°
까지 붙잡아줍니다

58°



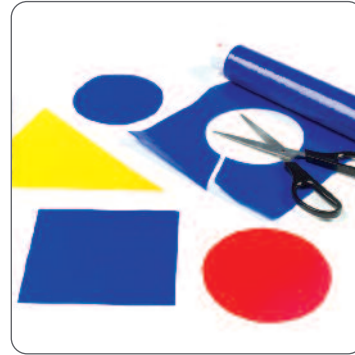

내용	페이지
가정 내	06-11
좌석과 위치	12-15
낙하 방지	16-17
병원, 운동과 물리 치료	18-23
직장에서	24-25
제품 개요	26-27
무한한 용도	28-29
제품 관리	30
제품 설명 & 구입처	31

가정 내

Dycem은 특별히 잡는 데 어려움을 가진 사람들에게 유용하지만 가정 내에서 Dycem이 어떻게 다용도로 사용되는지 보여드리겠습니다...



때로는 아주 작은 도구가 큰 도움이 될 때가 있는데 만약 관절염을 가진 손이라면 더욱 그러할 것입니다. Dycem 미끄림방지 통 그리고 병 따개 사용이 바로 그 하나의 예입니다. Dycem 미끄림방지 자재는 힘을 덜 쓰면서 통이나 병을 열 수 있게 도와줌으로써 동반되는 통증을 완화시켜줍니다.

Dycem 오프너는 주방에서뿐 아니라, 욕실에서 약 병 또는 청소 도구들에게도 유용하게 쓰입니다.



이 페이지에 보이는 제품은 통따개 & 매트 세트, 병따개, 컵받침과 매트입니다.

Dycem 오프너는 Yours Magazine 이 실시한 독자적 설문조사에서 스코어 10/10을 획득하여 최상의 병 따개 도구로 선정되었습니다.



// 병따개로 사용하는데 정말 편하게 사용하고 있어 감동적입니다. 저는 손과 손목에 통증이 심한데 Dycem 미끄림방지 병따개는 사용이 정말 편합니다; 사실, 저는 이런 종류의 제품들을 여러개 가지고 있는데 Dycem이 제일 쓰기가 편합니다. 부드럽고 신축성이 있어 꼭 잡아주니까 제 손바닥과 손가락의 위치를 저한테 맞게 할 수 있어요.

스티븐슨 여사(Mrs G Stephenson), 영국.

//



노란 색 제품들

시력이 불완전한 많은 사람들에게는 색상대비가 중요한 것으로, 이는 작업대에 대비하여 물건들을 더 쉽게 볼 수 있도록 도와줍니다.

흰 그릇을 밝은 색상의 Dycem 매트위에 두면 그릇이 더 잘보이게 하면서 또한 더 안정되게 합니다.

노란 색 제품들은 RNIB, www.rnib.org.uk 와의 협력하에 개발되어 왔습니다.

RNIB

시각 장애인과 제한된 시각을 가진 사람들을 지원합니다.



이 페이지에 보이는 제품은 매트와 스트립입니다.

// Dycem은 제 필요에 대한 완벽한 해결책입니다! 저는 영구적인 휠체어 사용자로, 콩자루 모양의 쿠션을 써서 쟁반을 무릎 위에 놓습니다.

무릎 높이를 똑같이 맞추지 않으면, 음식을 담은 접시들이 미끄러져서 바닥에 떨어집니다. Dycem 제품을 쓰면 쟁반이 웬만큼 기울어져도 접시뿐 아니라 수저도 안정되게 제자리에 있지요.

머빈 키블 (Mervyn Keeble), 미국"







Dycem 미끄럼 방지 매트는 식사 및 식탁 활동에 다양한 도움을 줍니다. 믹싱 그릇, 도마 그리고 믹서기와 함께 사용하면 아주 훌륭합니다.



이 페이지에 보이는 제품은 통 따개와 매트입니다.

좌석및 배치

Dycem 릴 혹은 네팅은 필요한 크기로 자를 수 있어서 필요하면 가구에도 정교하게 사용할 수 있습니다. 컬러 옵션도 다양하여 개인의 취향에 따라서 가구색과 대조 또는 혼합되게 사용할 수 있습니다.

릴과 네팅은 세탁가능하며, 재배치 및 재사용이 가능하여 좌석 용품의 비용 절감 해결책이 됩니다.





Dycem 미끄림 방지 릴을 발 아래나 좌석 밑에 깔면 앉고 설 때 위치 및 자세를 개선해줍니다.

또한 팔걸이에 사용하면 변화된 분위기를 그리고 쿠션이나 베개 밑에 깔면 미끄림을 방지하는 효과를 가져옵니다.



이 페이지에 보이는 제품은 릴과 가구 디스크입니다.





!! 편안하게 앉을 수 있다는 것은 사회적, 심리적 그리고 육체적으로 지극히 중요합니다. Dycem 은 앉는 자세에 있어 최적의 상태에 도달하도록 도와줍니다. !!

젠 케이브-에일랜드(Jen Cave-Ayland),
작업치료사

이 페이지에 보이는 제품은 접착 스트립, 릴 그리고 네팅입니다.

넘어짐 방지

앉았다 일어서거나 혹은 그 반대 동작을 할 때 제대로 된 기술을 사용하여야만 넘어지는 사고를 줄일 수 있습니다.

Dycem 매트는 의자나 침대 대응으로 바닥에 깔아 줌으로써 발이 올바른 위치를 잡도록 해줍니다.





Dycem 미끄럼방지 바닥 매트는 앉은 자세에서 힘주어 일어날때 혹은 반대로 몸을 낮춰 자리에 앉을때 체중 이동이나 균형감 이상을 경험하는 사람들에게 발디딤을 견고하게 하도록 합니다.

이 페이지에 보이는 제품은 바닥 매트와 노우즈 오버 토투즈 매트입니다.

임상, 운동 및 물리 치료

각각의 치료 부서들은 Dycem 제품을 구비함으로써 혜택을 누릴 수 있습니다. 마찬가지로, 지역담당 치료사들도 이 제품들을 꼭 상비해야 할 것입니다. 어떤 상황이나 환경에서도, Dycem은 고객의 치료 능력 및 궁극적인 독립성을 극대화하는데 도움이 될 것입니다.





Dycem 릴과 매트는 팔, 다리 및 무릎아래 부착하여, 걸음걸이 재교육 및 균형감각 활동을 돕는데 사용됩니다.

Dycem은 또한 체중지지운동시 운동기구나 사지에 안정감을 줍니다.



이 페이지에 보이는 제품은 매트와 릴입니다.



❗ 뇌졸중 관련 물리치료사로서 Dycem 미끌림 방지 제품들을 사용함으로써 굉장한 임상효과들을 보고있습니다.


중한 반신불수 뇌졸중에서부터 경미한 사례에 이르기까지 개개인의 힘과 움켜잡는 것에 있어, Dycem 미끌림방지 제품들은 모든 고객들에게 제 기능을 다하고 있습니다. ❗

아담 페이지 (Adam page), 공인 물리치료사



이 페이지에 보이는 제품은 릴과 매트입니다.



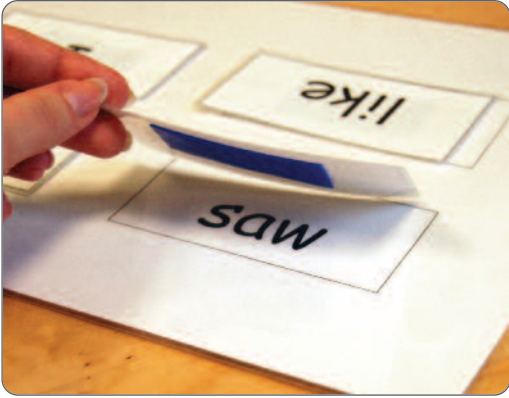

Dycem 릴은 크기별로 자를 수 있어 페달 아래에 붙이면, 운동자로 하여금 움직임을 방지할 수 있습니다. Dycem 매트는 평행봉 운동시 안정감을 줄 수 있습니다.



이 페이지에 보이는 제품은 매트, 릴 그리고 스트립입니다.

직장에서

Dycem은 직장에서도 훌륭한 용도로 사용됩니다. 작업시 요구되는 육체적인 요구를 줄임으로써 독립적으로 작업을 마칠수 있도록 도움을 줍니다.



Dycem 미끄럼방지 제품들을 직장 그리고 학교에서 사용하여 통합 및 독립성을 극대화 할 수 있습니다.

Dycem 제품의 다양한 폭의 컬러는 신중한 작업환경이든 재미를 추구하는 작업이든 그 모든 것을 가능하게 해 줍니다.

Dycem 제품들은 아래와 같이 다양하게 사용될 수 있습니다;

- ✓ 글을 쓰는 동안 종이나 책을 고정하는 데
- ✓ 컴퓨터 자판이 움직이지 않도록
- ✓ 글쓰는 도구들에 감아서 더 확실하게 잡을 수 있도록



이 페이지에 보이는 제품은 매트, 릴 그리고 컵 홀더입니다.

제품 개요



필

제품	은색/4	파랑색/1	빨강색/2	초록색/3	검정색/6	노랑색/8	흰색/5	회색/7	분홍색/PK	라임색/LM
오리지널 NS03/S1 20cm x 1m x x 0.6mm (8" x 3' x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
오리지널 NS03/L1 40cm x 1m x 0.6mm (16" x 3' x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
오리지널 NS03/S2 20cm x 2m x 0.6mm (8" x 6' 6" x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
오리지널 NS03/L2 40cm x 2m x 0.6mm (16" x 6' 6" x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
오리지널 NS03/S5 20cm x 5m x 0.6mm (8" x 16' 4" x 1/40")		•	•			•				
오리지널 NS03/L5 40cm x 5m x 0.6mm (16" x 16' 4" x 1/40")		•	•			•				
오리지널 NS03/S9 20cm x 9m x 0.6mm (8" x 29' x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
오리지널 NS03/L9 40cm x 9m x 0.6mm (6" x 29' x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Reel & dispenser NS13/RDS 20cm x 15m x 0.6mm (8" x 16 ¹ / ₂ Yd x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Reel & dispenser NS13/RDL 40cm x 15m x 0.6mm (16" x 16 ¹ / ₂ Yd x 1/40")	•	•	•	•	•	•	•		•	•



컵받침 & 식기받침

제품	은색/4	파랑색/1	빨강색/2	초록색/3	검정색/6	노랑색/8	흰색/5	회색/7	분홍색/PK	라임색/LM
컵받침 (4) NS08/MC 9cm x 9cm x 3mm (3 1/2" x 3 1/2" x 1/8")	•	•	•	•	•	•				
컵받침 NS02/14 14cm diameter x 3mm (5 1/2" x 1/8")	•	•	•	•	•	•			•	•
매트 NS02/19 19cm diameter x 3mm (7 1/2" x 1/8")	•	•	•	•	•	•			•	•
매트 NS02/SM 25cm x 18cm x 3mm (10" x 7.25" x 1/8")	•	•	•	•	•	•			•	•
매트 NS02/MD 35cm x 25cm x 3mm (10" x 14" x 1/8")		•	•	•	•	•			•	•
매트 NS02/LG 38cm x 45cm x 3mm (15" x 18" x 1/8")		•	•	•	•	•			•	•



바닥 매트/가구 디스트

제품	은색/4	파란색/1	빨간색/2	초록색/3	검정색/6	노랑색/8	흰색/5	회색/7
가구매트 NS02/FM 45cm x 60cm x 3mm NS02/FM (18" x 24" x 1/82")		•						•
노우즈 오버 토투즈 NS14/PM 35cm x 50cm x 1 mm (13 3/4" x 20" x 1/32")					•			
가구 디스크 NS09/SF/직경 1 6.5cm		•						



오프너

제품	은색/4	파란색/1	빨간색/2	초록색/3	검정색/6	노랑색/8	흰색/5	회색/7
통따개 NS07/JO 직경 11.8cm (5")	•	•				•		
병따개 NS07/BO 직경 5.2cm (2")	•	•				•		
통따개 & 매트 세트 (통따개 & 14cm 컵받침) NS07/JM (5 1/2")	•	•				•		



제품	은색/4	파란색/1	빨간색/2	초록색/3	검정색/6	노랑색/8	흰색/5	회색/7
패널 NS05/PA 40cm x 90cm x 0.8mm (16" x 1 Yd x 1/32")		•	•			•		
스트립 (3) NS05/ST 40cm x 3cm x 0.8mm (16" x 1 1/8" x 1/32")		•				•		
네팅 NS07/NE 60cm x 2m (2' x 6'6")							•	

Dycem의 사용은 무궁무진하
여, 보트에서 음악 음식공급
그리고 연구실 등 그 적용사례
는 무한합니다...

홈 & 레저



작업치료



음악



사무실



음식공급




해양




교통



산업

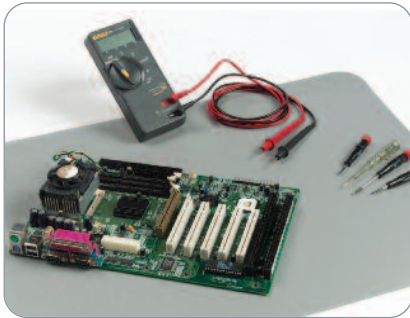

연구실

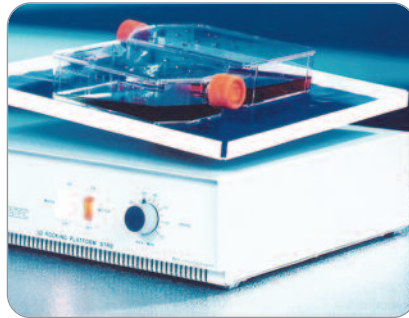


인쇄된 매트



여러분의 Dycem 제품이 더러워지거나 먼지가 쌓였다면, 비눗물을 푼 따뜻한 물에 씻어서 말리는 단순한 작업을 통해 미끄럼방지 제품들을 복원시킬 수 있습니다.

대안책으로 알코올이 첨가된 Dycem 미끄럼방지 물수건을 사용 미끄럼방지 제품들을 닦아준 뒤 즉시 말리면 곧바로 재사용할 수 있습니다.

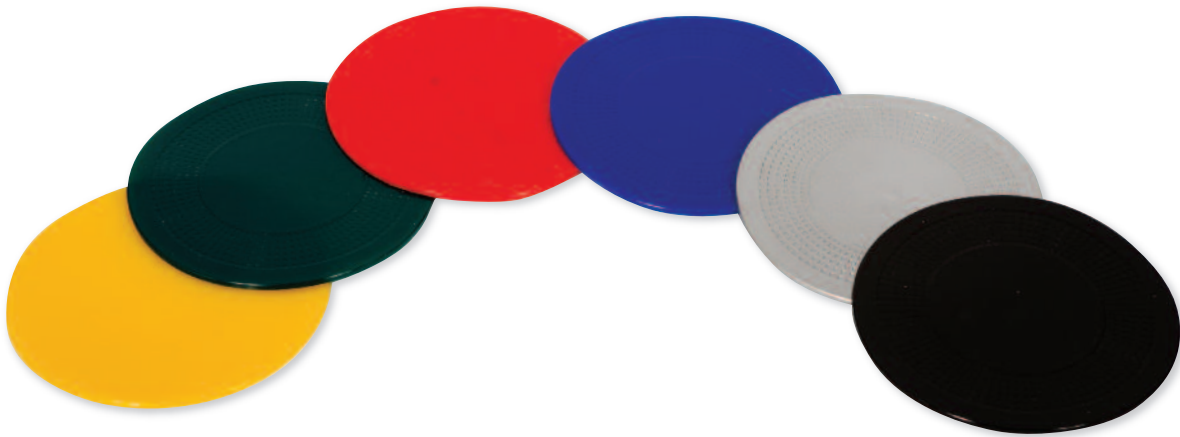

이 페이지에 보이는 제품은 컵홀더, 물수건, 릴 그리고 매트입니다.

위 제품들에 대한 세부사항 및 dycem 전 제품에 대한 문의는 www.dycem-ns.com 으로 방문하시거나 +44 (0) 117 955 9921 로 전화해 주십시오.

저희 배급업자 정보나 무료 제품 샘플이 필요하시면 nonslip@dycem.com 로 이메일해 주십시오.



삶을 보다 편하게

Dycem® non-slip

GRIPS • HOLDS • OPENS



Dycem Ltd

Ashley Trading Estate,
Bristol BS2 9BB, United Kingdom

Tel: +44 (0) 117 955 9921
Fax: +44 (0) 117 954 1194
uk@dycem.com

Dycem Ltd USA

83 Gilbane Street, Warwick,
RI 02886, USA

Tel: 1-800 458 0060
Fax: 401 739 9634
info@dycemusa.com

© 2014 Dycem Ltd. 저작권



배급자:



Dycem 제품을 어떻게 사용하고
있는지 여러분의 이야기를
yourideas@dycem.com 으로

www.dycem.com